

 FPT Retail TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG LONG CHÂU	QUY TRÌNH VỆ SINH & KHỬ KHUẨN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ	Mã số	03-QT/VS/HDCV/FRT.VX
		Ngày hiệu lực	03/07/2023
		Lần BH/SĐ	1/0

MỤC LỤC

1. MỤC ĐÍCH.....	2
2. PHẠM VI ÁP DỤNG	2
3. TÀI LIỆU LIÊN QUAN	2
4. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT	2
4.1. Định nghĩa.....	2
4.2. Các từ ngữ viết tắt.....	2
5. TRÁCH NHIỆM	3
6. NỘI DUNG QUY TRÌNH.....	3
6.1. Quy trình tiệt khuẩn dụng cụ y tế.....	3
6.1.1. Quy định tiệt khuẩn	3
6.1.2. Quy trình tiệt khuẩn	3
6.2. Quy trình vệ sinh bề mặt trang thiết bị y tế.....	6
6.2.1. Quy định chung	6
6.2.2. Các bước vệ sinh bề mặt trang thiết bị y tế.....	6

Người lập	Người xem xét	Người phê duyệt
		
GĐ Dự án vắc xin Lê Tuấn Anh	GĐ Chất lượng Lê Bình Phương Lộc	CT HĐQT Nguyễn Bạch Diệp

 TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG LONG CHÂU	<u>QUY TRÌNH</u> VỆ SINH & KHỬ KHUẨN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ	Mã số	03-QT/VS/HDCV/FRT.VX
		Ngày hiệu lực	03/07/2023
		Lần BH/SĐ	1/0

1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự các bước vệ sinh & khử khuẩn trang thiết bị y tế tại Trung tâm Tiêm chủng Long Châu nhằm đảm bảo trang thiết bị y tế được vệ sinh, khử khuẩn thích hợp, ngăn ngừa nguyên nhân lây nhiễm chéo cho khách hàng & nhân viên y tế.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho quá trình vệ sinh & khử khuẩn TTBYYT tại Hệ thống Trung tâm tiêm chủng Long Châu.

3. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính Phủ Quy định về hoạt động tiêm chủng
- Thông tư 34/2018/TT-BYT, ngày 12 tháng 11 năm 2018. Thông tư quy định về hoạt động tiêm chủng.
- Quyết định số 3671/2012/QĐ-BYT về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn.

4. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT

4.1. Định nghĩa

- *Khử khuẩn* là quá trình loại bỏ hầu hết hoặc tất cả các vi sinh vật gây bệnh trên dụng cụ nhưng không diệt bào tử vi khuẩn. Có 3 mức độ khử khuẩn: khử khuẩn mức độ thấp, trung bình, cao.
- *Làm sạch* là quá trình sử dụng biện pháp cơ học để làm sạch những tác nhân nhiễm khuẩn và chất hữu cơ bám trên những dụng cụ mà không nhất thiết phải tiêu diệt được hết tác nhân nhiễm khuẩn. Quá trình làm sạch là một bước bắt buộc phải thực hiện trước khi thực hiện quá trình khử khuẩn, tiệt khuẩn tiếp theo. Làm sạch ban đầu tốt sẽ giúp cho hiệu quả việc khử khuẩn, tiệt khuẩn được tối ưu.
- *Tiệt khuẩn* là quá trình tiêu diệt hoặc loại bỏ tất cả các dạng của vi sinh vật sống bao gồm cả bào tử vi khuẩn.

4.2. Các từ ngữ viết tắt

KK	: Khử khuẩn
TK	: Tiệt khuẩn

 FPT Retail TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG LONG CHÂU	<u>QUY TRÌNH</u> VỆ SINH & KHỬ KHUẨN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ	Mã số	03-QT/VS/HDCV/FRT.VX
		Ngày hiệu lực	03/07/2023
		Lần BH/SD	1/0

NV	: Nhân viên
TTBYT	: Trang thiết bị y tế

5. TRÁCH NHIỆM

NV trung tâm tiêm chủng: có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện theo đúng Quy trình này.

6. NỘI DUNG QUY TRÌNH

6.1. Quy trình tiệt khuẩn dụng cụ y tế.

6.1.1. Quy định tiệt khuẩn

- Cuối ngày tiêm, điều dưỡng phải tiến hành làm vệ sinh và tiệt khuẩn các dụng cụ thiết bị y tế sau:
 - + Mâm tiêm
 - + Bình kèm y tế
 - + Kèm y tế

6.1.2. Quy trình tiệt khuẩn

a. Lưu đồ

 TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG LONG CHÂU	<u>QUY TRÌNH</u> VỆ SINH & KHỬ KHUẨN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ	Mã số	03-QT/VS/HDCV/FRT.VX
		Ngày hiệu lực	03/07/2023
		Lần BH/SĐ	1/0

Bước	Trách nhiệm	Nội dung	Thời gian thực hiện	Biểu mẫu liên quan
1	Điều dưỡng	Dụng cụ, trang thiết bị y tế sau khi sử dụng	Cuối ngày	
2	Điều dưỡng	Làm sạch, để khô	Cuối ngày	
3	Điều dưỡng	Tiệt khuẩn	Trong 30 phút	
4	Điều dưỡng	Lưu trữ	Cuối ngày	
		Kết thúc		

 TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG LONG CHÂU	<u>QUY TRÌNH</u> VỆ SINH & KHỬ KHUẨN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ	Mã số	03-QT/VS/HDCV/FRT.VX
		Ngày hiệu lực	03/07/2023
		Lần BH/SĐ	1/0

b. Các bước thực hiện:

Bước	Hướng dẫn chi tiết	Người thực hiện	Thời gian thực hiện	Kết quả	Hồ sơ liên quan
1	Làm sạch, để khô dụng cụ y tế sau khi sử dụng: - Cuối ngày, điều dưỡng tiến hành rửa sạch các dụng cụ y tế như mâm tiêm, kèm y tế,... và lau khô.	Điều dưỡng	Cuối ngày	Dụng cụ y tế được làm sạch	
2	Tiệt trùng: - Sau khi được làm sạch, để khô, điều dưỡng sắp xếp mâm tiêm, kèm y tế, ... vào tủ hấp tiệt trùng và thực hiện hấp tiệt trùng bằng tia UV 240V trong vòng 30 phút.	Điều dưỡng	Cuối ngày	Dụng cụ y tế được tiệt trùng	
3	Lưu trữ: - Sau khi được tiệt trùng, Điều dưỡng tiến hành lấy dụng cụ y tế ra sắp xếp chuẩn bị cho ca tiêm.	Điều dưỡng	Ca tiêm sau/ Sáng hôm sau	Dụng cụ y tế đã được tiệt trùng được chuẩn bị trước buổi tiêm	

 FPT Retail TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG LONG CHÂU	<u>QUY TRÌNH</u> VỆ SINH & KHỬ KHUẨN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ	Mã số	03-QT/VS/HDCV/FRT.VX
		Ngày hiệu lực	03/07/2023
		Lần BH/SĐ	1/0

6.2. Quy trình vệ sinh bề mặt trang thiết bị y tế.

6.2.1. Quy định chung

- Cuối ngày tiêm, NV vệ sinh phải tiến hành làm vệ sinh bề mặt các thiết bị y tế sau:
 - + Xe tiêm
 - + Tủ lạnh
 - + Máy tiệt trùng, khử khuẩn
 - ...
- Dụng cụ:
 - + Khăn lau
 - + Cồn 70°C
 - + Phương tiện bảo hộ cá nhân: găng tay y tế,...

6.2.2. Các bước vệ sinh bề mặt trang thiết bị y tế,...

 TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG LONG CHÂU	QUY TRÌNH VỆ SINH & KHỬ KHUẨN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ	Mã số	03-QT/VS/HDCV/FRT.VX
		Ngày hiệu lực	03/07/2023
		Lần BH/SĐ	1/0

Bước	Trách nhiệm	Nội dung	Thời gian thực hiện	Mô tả
1	NV vệ sinh	Dụng cụ, trang thiết bị y tế sau khi sử dụng	Cuối buổi/ngày tiêm hoặc khi cần	Cuối buổi/ngày tiêm hoặc khi cần, NV vệ sinh tiến hành thực hiện vệ sinh bề mặt các trang thiết bị y tế, dụng cụ,...
2	NV vệ sinh	Lau sạch		Bước 1: Vệ sinh tay Bước 2: Đeo găng y tế Bước 3: Lau sạch bụi bằng khăn hoặc gạc mềm Bước 4: Dùng khăn mềm, gạc, bông tẩm cồn 70°C để lau bề mặt thiết bị
3	NV vệ sinh	Sắp xếp lại		Dọn dẹp, sắp xếp gọn gàng lại đồ dùng, thiết bị,...
4	NV vệ sinh	Vệ sinh tay		Tháo găng tay và rửa tay
		Kết thúc		

 FPT Retail TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG LONG CHÂU	<u>QUY TRÌNH</u> VỆ SINH & KHỬ KHUẨN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ	Mã số	03-QT/VS/HDCV/FRT.VX
		Ngày hiệu lực	03/07/2023
		Lần BH/SD	1/0

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

STT	Phiên bản	Vị trí sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Người sửa đổi	Người phê duyệt	Ngày hiệu lực
1	1/0	All	Ban hành mới	AnhLT154	DiepNB	03/07/2023